

オプション

●医療理化学用洗浄剤(無リン)

◎洗浄対象物／手術器具類、鉗子、
鋼製小物類、チューブ、
ゴム類、注射等

◎使用濃度／超音波洗浄の場合0.5%


アスカピュア
AC-6000




●NET.3.5ℓ ●1ケース4本入

●カートリッジ

簡単に脱着できる蛇管用と、チューブ用の
2タイプで、用途に応じてご使用できます。

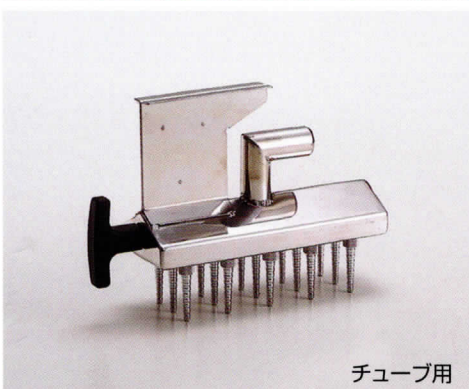

チューブ用

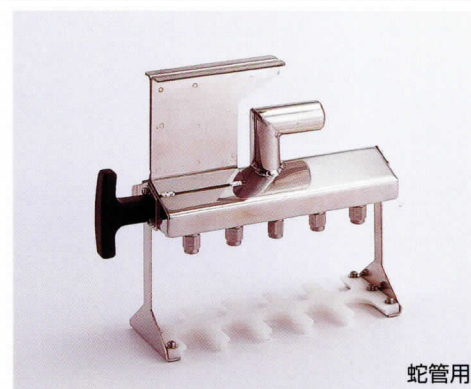

蛇管用

●ノズル

用途に応じて取替え可能です。



仕 様

仕 様	規 格	仕 様
		ASK-850MI
本 体 外 寸 法	850W×670D×1850H mm	
槽 内 寸 法	450W×340D×1600H mm	
貯 水 量	25L	
材 質	ステンレスSUS304 ヘアライン仕上げ	
運 転 制 御	自動専用型マイクロコンピューター	
洗 浄 ポ ンプ	MAX200L/min	
蛇 管、チューブ	ワンタッチ脱着式 3箇所 クロスパイプ6箇所	
洗 剤	毎回自動注入 残量確認窓付	
乾 燥 方 式	温風乾燥方式	
乾 燥 用 ブロワー	MAX1.8m³/min	
乾 燥 用 フ ァ ン	MAX6m³/min	
給 湯 設 備	15A 0.1~0.2mpa 20L/min	
給 水 設 備	15A 0.1~0.2mpa 20L/min	
排 水 設 備	50A	
電 気 設 備	AC100V 50/60Hz 15A	
本 体 重 量	120kg	

※カタログ仕様は予告なく変更することがあります。

製造販売元

株式会社 アスカメディカル

医療機器製造業許可証 27BZ200023
第2種医療機器製造販売業許可証 27B2X00210

■本社・工場 〒536-0008 大阪府城東区関目2丁目12番10号 TEL(06)6939-3011(代) FAX(06)6939-3225
■東京支店 〒111-0055 東京都台東区三筋1-12-3金子ビル1F TEL(03)5820-5662(代) FAX(03)5820-5663
URL/http://www.asukamedical.co.jp/ E-mail/askhm@asukamedical.co.jp

●お問い合わせは……………

新機構の洗浄・乾燥・システムの合理化を実現

CYCLE BEST

サイクルベスト

ASK-850mi

全自動による
洗浄・乾燥システム



ASUKA MEDICAL CO.,LTD.

CYCLE BEST
サイクルベスト

全自動チューブ洗浄乾燥器

洗浄と乾燥の 新機構

- 専用カートリッジに装着し、セットするワンタッチ脱着方式。
- ろ過したエアで、温風乾燥陽圧エアをリークする置換乾燥。

●蛇管洗浄

蛇管は、専用のカートリッジに10本架、計30本の洗浄と乾燥ができます。カートリッジに継いだ蛇管の内筒をノズル噴射で洗浄します。蛇管外筒は庫内4隅に設置した、上段、中段、下段計16ヶの噴射ノズルで洗浄を行い外筒の全てを洗浄します。

●チューブ洗浄


チューブ類は、専用のカートリッジに15本架計45本の洗浄と乾燥ができます。カートリッジに継いだ各チューブ類の内筒を、ノズル噴射で洗浄します。各チューブ類外筒は、庫内4隅に設置した上段、中段、下段計16ヶのノズルで洗浄を行い、外筒の全てを洗浄します。

●ロングチューブ洗浄

独自のクロスパイプを、庫内背面に6本設置、ワンタッチで水平に起し、チューブ・蛇管を、クロスにかけて、縦ウエーブ状に曲折して、内筒、外筒を洗浄します。

●温風置換乾燥

ろ過したエアを60℃に加熱し、カートリッジを通し強制的に内筒を吹き抜ける内筒乾燥と、庫内背面上部に設置した攪拌用ファンが乱流し、外筒を乾燥する相乗効果が短時間での乾燥を実現。合わせて庫内陽圧エアを、排気口より常圧にリークするエア置換方式が効果を上げます。

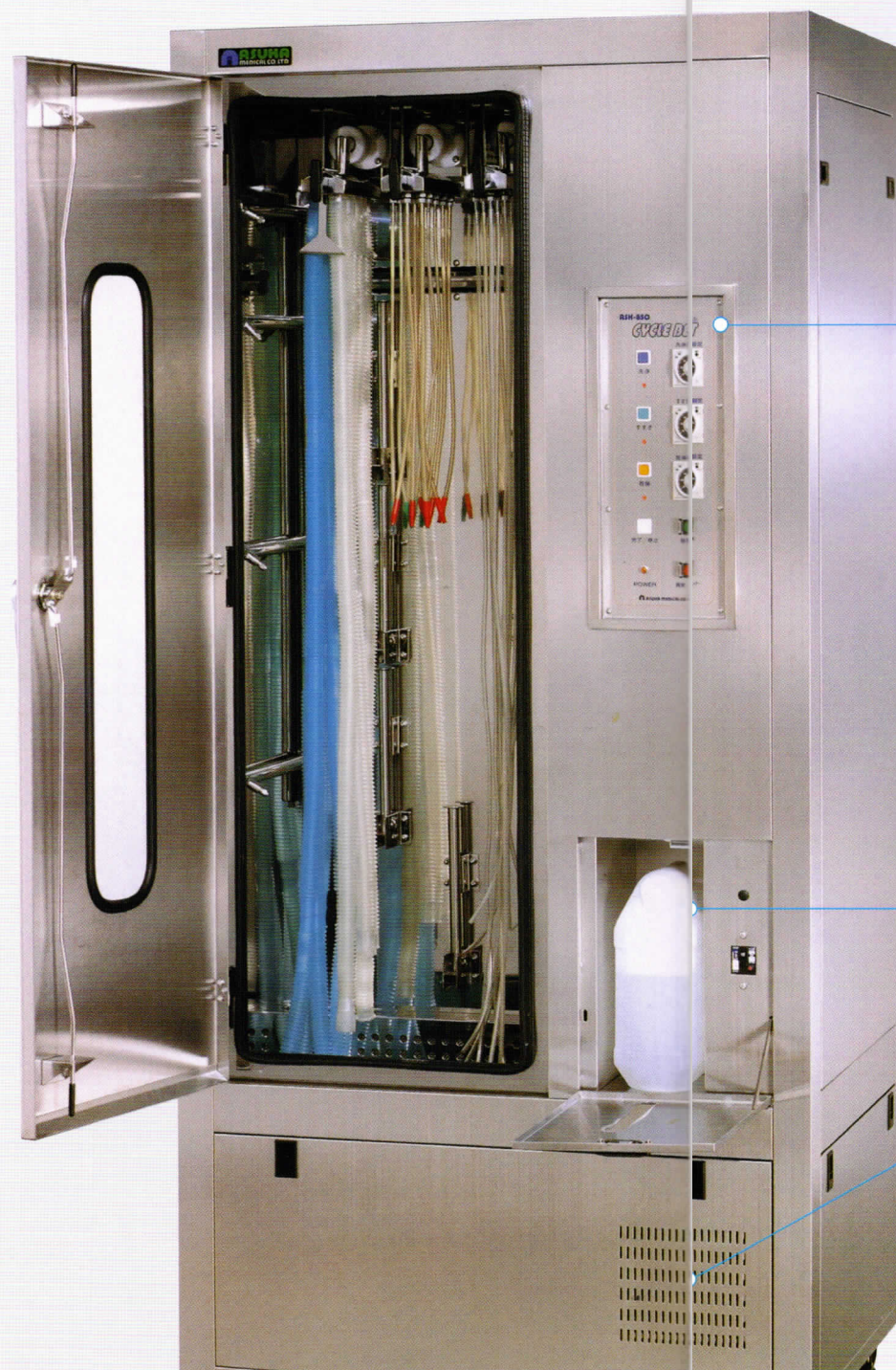

ASK-850mi

サイクルベスト


- 制御パネル
洗浄時間 } をセット
すすぎ時間 }
乾燥時間 }
- 洗浄スイッチONで、完了まで全自動制御で行います。

●サイクル専用洗剤


洗浄スイッチON(スタート)で、洗剤が自動注入します。洗剤ボトルの残液が外から確認できます。

●ろ過フィルター(吸入口)


●ロングチューブ装着式

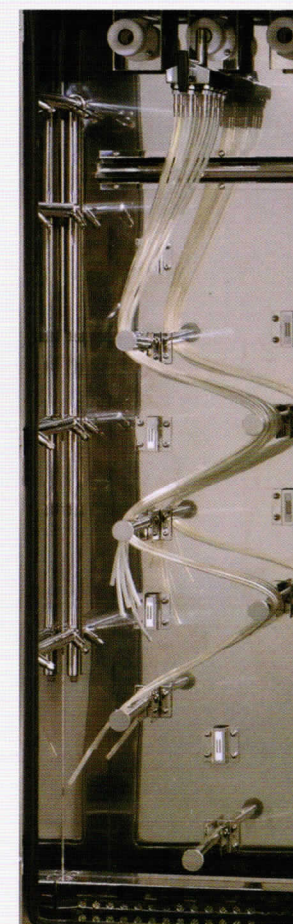

●上段ノズル配置図

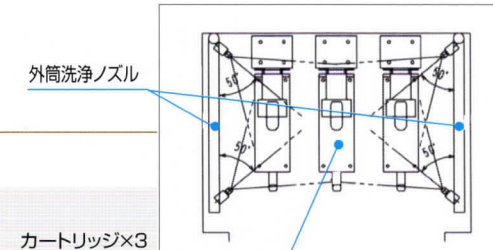

●庫内ノズル配置図(クロスパイプ)

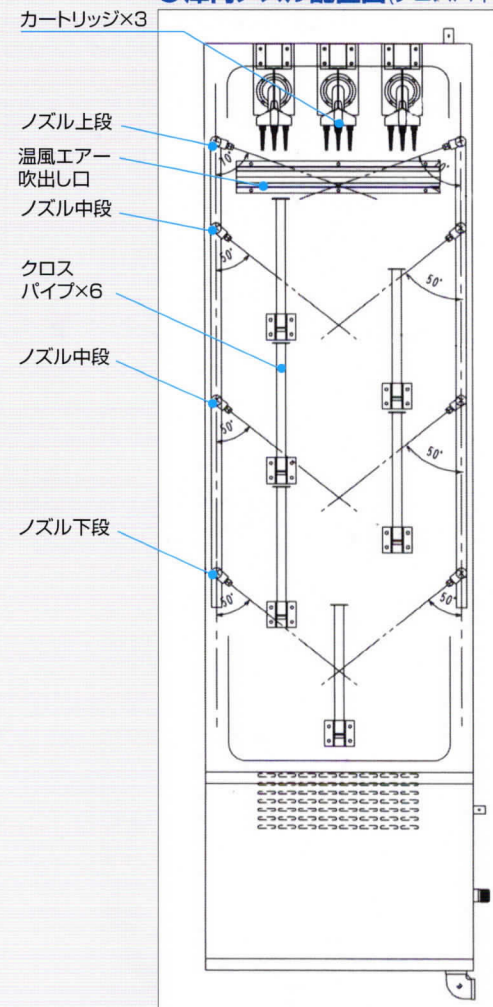

●サイクルベスト フローチャート

