


【特許取得済】特許第7321593号・特許第7104272号

# Air Force


多機能型乾燥器

## オプション品

■インストール専用バスケット

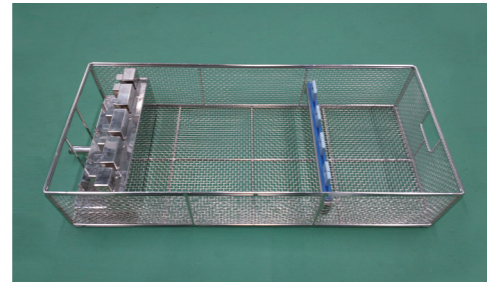

■内腔用バスケット

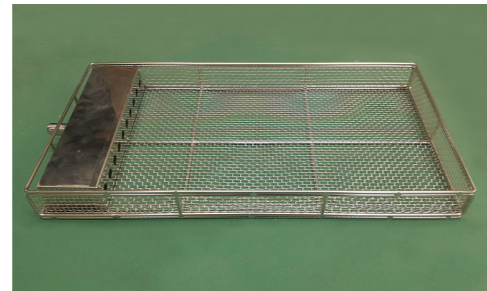

大きく見やすい

運転中、庫内温度の表示と残り時間が大きく表示され見やすい

## 時代の变化が創った M X 乾燥器

適切な温度管理と風力で短時間での乾燥が可能です。動画でわかりやすく説明しています！



YouTube

説明動画も CHECK



## 仕様・寸法

製品名	Air Force エアフォース			
型式	ASK-1200DHS	ASK-1200DH	ASK-1200DHS2	ASK-1200DH2
ドアタイプ	シングルドア	ダブルドア	シングルドア	ダブルドア
本体寸法	W1,200×D760×H1,900mm			
庫内寸法	W900×D705×H1,060mm			
本体質量	300kg			
標準付属品	インストール専用バスケット×2 棚板(Lアングル付)×5			
定格電源	単相100V 15A		三相200V 20A	
消費電力	1,010 W		1,540 W	
使用環境	周囲温度20~40℃ 相対湿度30~85%			

※カタログ仕様は予告なく変更することがあります。




「直接質問したい!」という方は、こちらから

アスカメディカル お問い合わせ

検索

自社展示会も Webにて開催中!

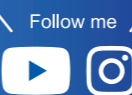

製造元

株式会社 アスカメディカル

医療機器製造許可証 27BZ200023  
第2種医療機器製造販売業許可証 27B2X00210

本社・工場/〒536-0008 大阪市城東区関目2丁目12番10号 TEL (06) 6939-3011 FAX (06) 6939-3225  
東京支店/〒111-0055 東京都台東区三筋1-12-2 金子ビル1階 TEL (03) 5820-5662 FAX (03) 5820-5663  
福岡営業所/〒812-0004 福岡市博多区榎田1丁目8-28 ツインスクエア3号 TEL (092) 292-7971 FAX (092) 292-7972

askhm@asukamedical.co.jp https://asukamedical.co.jp

2025.03.H.100


お問い合わせ先

# Air Force

多機能型乾燥器


エアフォース

Feature.1

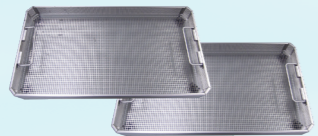


15 DIN バスケット  
枚以上 処理可能

Feature.2

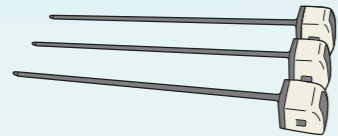

最大 16 手術支援ロボット  
本 処理可能  
※標準 8 本処理可能

Feature.3

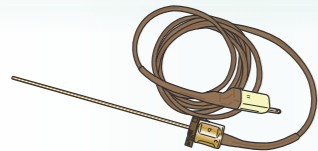

5 エンドスコープ  
本以上 処理可能

一度に  
乾燥!

Feature.4


運用に合わせて  
選べる  
4 タイプ

100V シングル・ダブル  
200V シングル・ダブル




正面

背面

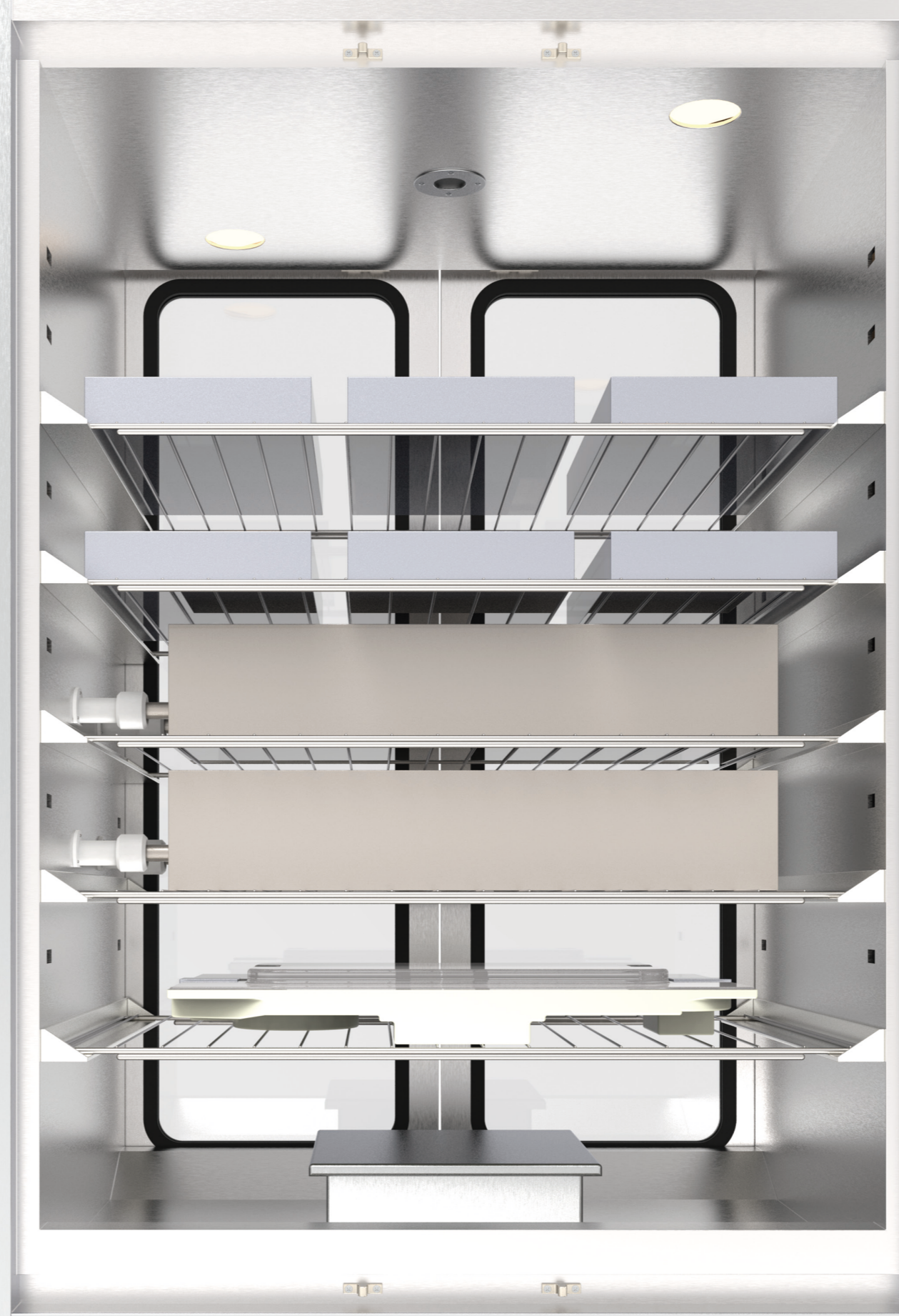

Point

庫内照明付きで  
小物も見やすい!

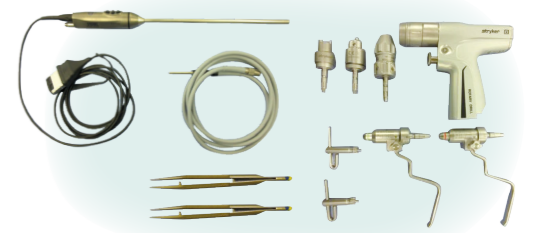


Point

マイクロ器材、カメラ、  
動力器械を入れ乾燥可能!

時代の変化が創った

## MIX 乾燥器


01 バスケットにインストゥルメント4本  
設置可能

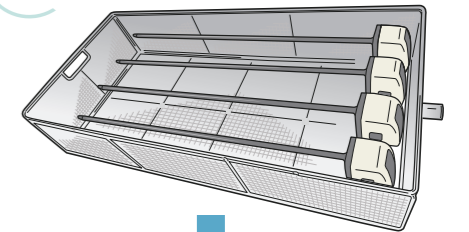

02 乾燥器内にバスケット4個設置可能



03 バスケットのジャックを、  
器械へスライドさせて装着

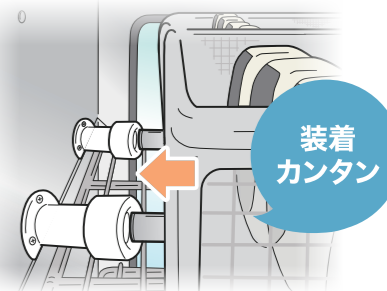

装着  
カンタン

内部への直接送風で  
滅菌不良解消!

同時 16本まで 処理可能