

Levi Clean


レビクリーン610RZ(M)



傘型振動子




オーバーフロー機能搭載

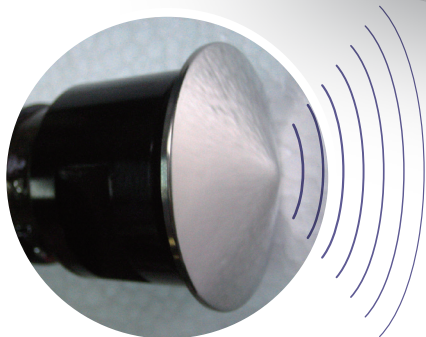


傘型振動子が 超音波洗浄力を変えます！

【従来型】

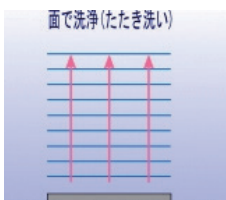

キャビテーション洗浄
従来型では硬質素材のみ対応
直線放射(定在波)の剥離洗浄

【新型】

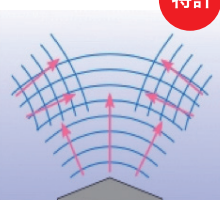

レビテーション洗浄
水中放射応力と縦波横波が
作用する剪断応力による洗浄

特許

従来のキャビテーションは、水分子を急加速することで真空を作り出し、その真空が破裂する力を使い、打撃で汚れを落とす、**たたき洗い**(打撃洗浄)です。

新技術のレビテーションは1つの波動に縦波動(+)と横波動(-)が存在し、交互に発振することで汚れを落とす、**こすり洗い**です。加えて発振ヘッドに角度をつけ、多方向発振することで洗浄ムラをなくします。

キャビテーションは**障害物に当たると消えます**が、レビテーションは**自己推進力があり、反撃を続けます**。従って障害物の陰の部分にも到達します。

内腔モード

吸引・押出ローテーション洗浄

内腔鉗子・吸引嘴管等を専用カートリッジカブラに装着し、吸引洗浄・押出し洗浄を交互に行い、内筒に付着した不純物を引き出す、押出す方法のローテーション洗浄で、内腔製品を確実に洗浄するメカシステムの新構築です。

器械モード

広角ノズル噴射式循環洗浄

洗浄槽背面に設置した広角ノズルより噴出した洗浄水が、器具器械に水平に流水する洗浄。超音波と独自の洗剤が相乗したシステムです。

すすぎモード

単独工程可能

すすぎ工程を単独で行うことで、ジェット洗浄器との併用洗浄や、消毒剤投入による消毒工程など、運用に合わせた速やかな作業が可能です。

オーバーフロー排水を採用


流水洗浄効果

槽内で滞留する水が少なくなるよう、水を効率良く灌流させ、浮上してきた汚れなどをオーバーフローさせます。汚れの再付着防止に役立ち、流水洗浄の役割りを果たします。

超音波切り替え

浸漬洗浄も可能

超音波機能をOFFにすることにより、浸漬洗浄器としても使用可能です。

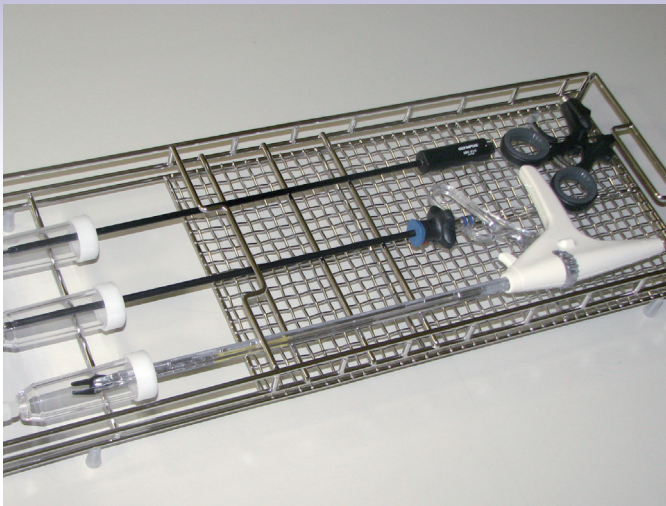


^{かんし}
管状鉗子用トレー ラパロ鉗子6本(3本×2段ラック)
押し出し洗浄・引き出し洗浄を交互に行い、内腔を確実に洗浄します。



^{しかん}
吸引嘴管用ボトル
洗いづらい吸引嘴管もきれいに洗浄可能です。

シリコンマットも
洗浄可能

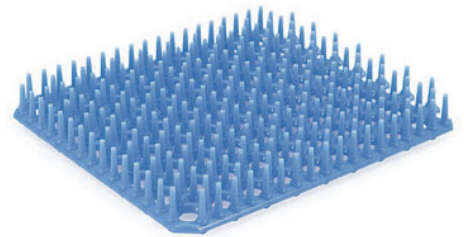

弊社システムシンクとの設置例

洗浄試験(当社試験データ)

ATP拭き取り数値/TOSI®・TOSI®ゴールド/洗浄良好



専用洗剤

- 自動注入方式
- 洗剤注入カウンター付き
- 酵素系弱アルカリ洗剤(4ℓ缶×4本/1箱)

[仕様]

製 品 名	レビクリーン610RZ(M)
本 体 外 寸 法	730W×500D×465H(mm) (後部高さ575H(mm))
槽 内 有 効 寸 法	560W×275D×175H(mm) (最大寸法)
本 体 質 量	85(kg)
材 質	ステンレスSUS304 #400研磨仕上げ
運 転 制 御	自動専用型マイクロコンピュータ
発 振 方 法	自励発振(各振動子単独駆動式)
発 振 子	チタンヘッド傘型ジェット弁方式
傘 型 弁 数	6個
定 格 電 源	単相100V 50/60Hz
電 源 容 量 / 消 費 電 力	15A / 0.8kw
発 熱 量 / 放 熱 量	688(kcal) / 337(kcal)

[設置条件]

給 水 設 備	供給圧力0.1~0.2(MPa) 供給配管立ち上がり100mm バルブ止め15A
給 湯 設 備	供給圧力0.1~0.2(MPa) 供給配管立ち上がり100mm バルブ止め15A
排 水 設 備	シンク又は50A排水口(背圧が無いこと)
使 用 環 境	周囲温度10℃~40℃ 相対湿度30~85%
ク ラ ス 分 類	クラスⅠ 一般医療機器
特 定 保 守 管 理 医 療 機 器	非該当

オプション	管状鉗子用カブラ	チューブ用トレー
	吸引嘴管カブラ	管状鉗子・吸引嘴管用トレー
	吸引嘴管用ボトル	専用架台
	ステンレスバスケット(小)	
	ステンレスバスケット(大)	

製造販売届出番号: 27B2X00210000022

製造元

株式会社 アスカメディカル

医療機器製造業許可証 27BZ200023
第2種医療機器製造販売業許可証 27B2X00210

■本社・工場 〒536-0008 大阪府大阪市城東区関目2丁目12番10号 TEL(06)6939-3011 FAX(06)6939-3225
■東京支店 〒111-0055 東京都台東区三筋1-12-2 金子ビル1階 TEL(03)5820-5662 FAX(03)5820-5663
■福岡営業所 〒812-0004 福岡市博多区榎田1丁目8-28 ツインスクエア3号 TEL(092)292-7971 FAX(092)292-7972

URL: <https://www.asukamedical.co.jp> E-mail: askhm@asukamedical.co.jp



直接質問したい方はこちらからどうぞ。

アスカメディカル 問い合わせ

検索

