

オプション

●カートリッジ
簡単に脱着できる蛇管用と、チューブ用の
2タイプで、用途に応じてご使用できます。



チューブ用




蛇管用

●専用洗浄剤



アスカピュア
AC-6000 ●NET.3.5L ●1ケース4本入

●チューブ用ノズル

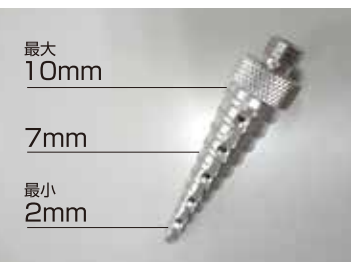

仕 様

仕様	規格	ASK-850mi
本 体 外 寸 法		850W×670D×1850H mm
槽 内 寸 法		450W×340D×1600H mm
貯 水 量		25L
材 質		ステンレス SUS304 ヘアーライン仕上げ
運 転 制 御		自動専用型マイクロコンピューター
洗 浄 ポ ンプ		MAX200L/min
蛇 管 ・ チ ュ ー ブ		ワンタッチ脱着式:3箇所 クロスパイプ:6箇所
洗 剤		毎回自動注入 残量確認窓付
乾 燥 方 式		温風乾燥方式
乾 燥 用 ブ ロ ヱ ー		MAX1.8m³/min
乾 燥 用 フ ァ ン		MAX6m³/min
給 湯 設 備		15A 0.1～0.2mpa 20L/min
給 水 設 備		15A 0.1～0.2mpa 20L/min
排 水 設 備		50A
電 気 設 備		AC100V 50/60Hz 15A
本 体 重 量		120kg

※カタログ仕様は予告なく変更することがあります。

新機構の洗浄・乾燥・システムの合理化を実現

CYCLE BEST

サイクルベスト

ASK-850mi

全自動による
洗浄・乾燥システム



マスコット
キャラクター
「アスカちゃん」

「直接質問したい!」という方は、こちらから

アスカメディカル お問い合わせ

検 索

自社展示会も
Webにて開催中!



製造元

株式会社 アスカメディカル

医療機器製造許可証 27BZ200023
第2種医療機器製造販売業許可証 27B2X00210

本社・工場/〒536-0008 大阪市城東区関目2丁目12番10号 TEL (06)6939-3011 FAX (06)6939-3225
東京支店/〒111-0055 東京都台東区三筋1-12-2 金子ビル1階 TEL (03)5820-5662 FAX (03)5820-5663
福岡営業所/〒812-0004 福岡市博多区榎田1丁目8-28 ツインスクエア3号 TEL (092)292-7971 FAX (092)292-7972

askhm@asukamedical.co.jp https://asukamedical.co.jp

お問い合わせ先

CYCLE BEST
サイクルベスト

洗淨と乾燥の 新機構

- 専用カートリッジに装着し、セットするワンタッチ脱着方式。
- ろ過したエアで、温風乾燥陽圧エアをリークする置換乾燥。

●蛇管洗淨

蛇管は、専用のカートリッジに10本架、計30本の洗浄と乾燥ができます。カートリッジに継いだ蛇管の内筒をノズル噴射で洗浄します。蛇管外筒は庫内4隅に設置した上段、中段、下段 計16ヶの噴射ノズルで洗浄を行い、外筒の全てを洗浄します。

●チューブ洗浄

チューブ類は、専用のカートリッジに15本架計45本の洗淨と乾燥ができます。カートリッジに継いだ各チューブ類の内筒を、ノズル噴射で洗淨します。各チューブ類外筒は、庫内4隅に設置した上段、中段、下段 計16ヶのノズルで洗淨を行い、外筒の全てを洗淨します。

●ロングチューブ洗浄

独自のクロスパイプを、庫内背面に6本設置。ワンタッチで水平に起こし、チューブ・蛇管をクロスにかけて、縦ウエーブ状に曲折して、内筒、外筒を洗浄します。

●温風置換乾燥

ろ過したエアーを60℃に加熱し、カートリッジを通し、強制的に内筒を吹き抜ける内筒乾燥と、庫内背面上部に設置した攪拌用ファンが乱流し、外筒を乾燥する相乗効果が短時間での乾燥を実現。合わせて庫内陽圧エアーを、排気口より常圧にリークするエアー置換方式が効果を上げます。





サイクルベスト

- **制御パネル**
- 洗淨時間 } をセット
すすぎ時間 }
乾燥時間 }
- 洗淨スイッチ ON で、
完了まで全自動制御で
行います。

- サイクル専用洗剤**
洗淨スイッチ ON(スタート)で、洗剤が自動注入します。洗剤ボトルの残液が外から確認できます。


- ろ過フィルター(吸入口)

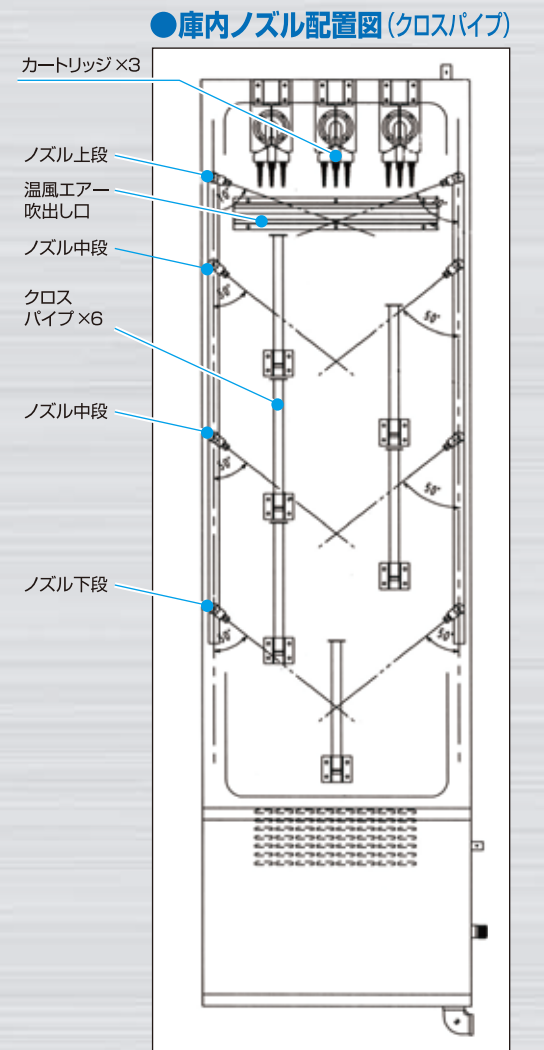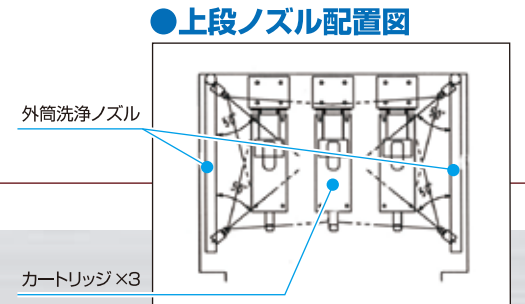

●ロングチューブ装着式



●サイクルベスト フローチャート

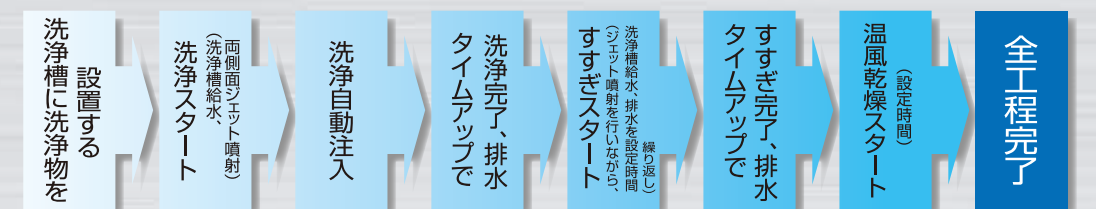

ASK-850mi