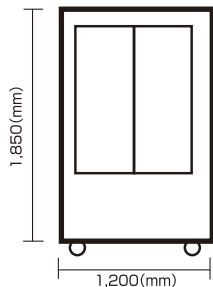
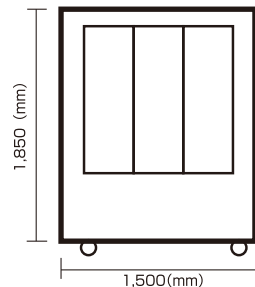


■仕様／寸法


	ASK-6000MD	ASK-6600MD
本 体 外 寸 法	1,200W×750D×1,850H (mm)	1,500W×750D×1,850H (mm)
材 質	ALLステンレスSUS304 ヘアーライン仕上げ	
運 転 制 御	自動専用型マイクロコンピュータ	
電 源	三相 200V 50/60Hz	
発 熱 量 / 放 熱 量	4,147(kcal) / 1,470(kcal)	4,147(kcal) / 1,703(kcal)
電気容量/消費電力	20A / 4.8kw	
配 管 径	給水15A・給湯15A・排水50A	
本 体 重 量	110Kg	150Kg
◎洗浄庫		
庫 内 有 効 寸 法	540W×400D×1,200H (mm)	
浸 漬 槽	30ℓ槽	
ポ ン プ	MAX200ℓ/min	
蛇管・チューブセット	脱着式3ヶ所	
◎乾燥庫		
庫 内 有 効 寸 法	540W×400D×1,200H (mm)	390W×400D×1,200H (mm)
乾 燥 方 式	温風乾燥方式	
蛇管・チューブセット	脱着3ヶ所	
◎保管庫		
庫 内 有 効 寸 法	—	390W×400D×1,200H (mm)
引 き 出 し カ ゴ	—	300W×345D×100H (mm)4段
庫 内 エ ア 圧 力	—	排気型陽圧維持
庫 内 エ ア ー	—	短波長UV型紫外線ランプ、10W間接照射式
形 状 図 寸 法		

製造元 **株式会社 アスカメディカル**
医療機器製造業許可証 27BZ200023 第2種医療機器製造販売業許可証 27B2X00210

■本社・工場 〒536-0008 大阪市城東区関目2丁目12番10号
 TEL(06)6939-3011(代) FAX(06)6939-3225
 E-mail : askhm@asukamedical.co.jp

■東京支店 〒111-0055 東京都台東区三筋1-12-2 金子ビル1階
 TEL(03)5820-5662(代) FAX(03)5820-5663

■福岡営業所 〒812-0004 福岡市博多区榎田1丁目8-28 ツインスクエア3号
 TEL (092)292-7971 FAX (092)292-7972

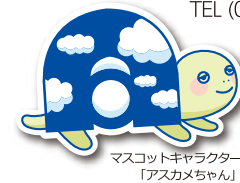

直接質問したい方はこちらからどうぞ。

アスカメディカル 問い合わせ

検索


■本体付属品

●カートリッジ



簡単に脱着できる蛇管用とチューブ用の2タイプで用途に応じてご使用できます。

●チューブ用ノズル

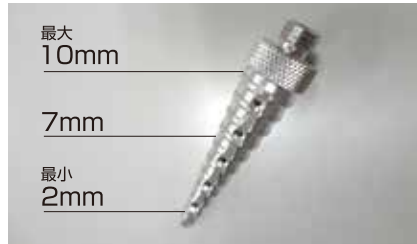

チューブ用のノズルで、用途に応じてご使用できます。

●浸漬用バスケット ●保管庫用トレー



ASK-6600MD用

■洗剤

●専用洗浄剤 アスカピュア (AC-6000)



NET.3.5L／1ケース4本入

お問い合わせ先




自動制御
による

洗浄 乾燥

ASK-6000MD
ASK-6600MD

こんなものが洗浄・乾燥できます

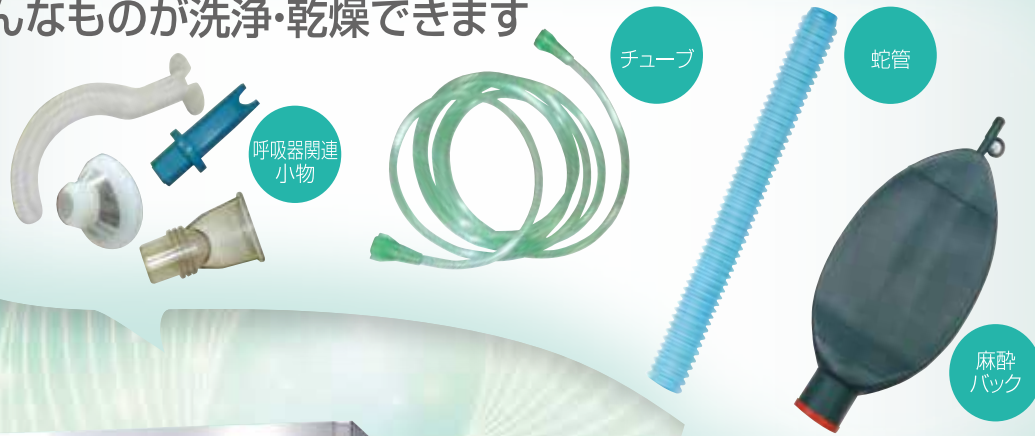

ASK-6000MD



ASK-6600MD

1日にたくさんの量をこなすなら 頼りになる『サイクルジェット』

時間と労力のかかる作業は器械に!



洗浄槽

対象物を専用カートリッジにつるし、ノズルから勢よく噴き出す洗浄水により、従来まで洗にくかった内筒を洗浄できます。外筒は側面18ヶ所の広角ノズルから洗浄します。

乾燥槽

バッグ、チューブ、蛇管等の内筒・外筒を専用カートリッジから噴き出す風により乾燥します。

●蛇管専用カートリッジ (乾燥槽も同様です)

作業台等で蛇管装着が可能なカートリッジ式。(小児用サイズの特注可)
※1カートリッジに10本装着可能。
蛇管のみ器械へ最大30本設置可能。



カートリッジ式なので作業台等で対象物の準備ができ、洗浄器にもラクラク設置。

●チューブ専用カートリッジ (乾燥槽も同様です)

作業台等でチューブの装着が可能なカートリッジ式。
※1カートリッジに15本装着可能。
チューブのみ器械へ最大45本設置可能。



ノズル側面に穴と溝があり、差し込んだ部分も洗浄可能。

●麻酔バッグ用フック

麻酔バッグはフックに引っ掛け、ノズルに差し込めば、5本洗浄可能です。



●小物洗浄槽

エアウェイ、バイドブロック、マスク等は、ステンレスバスケットに収納し、専用浸漬槽に入れます。




1人で簡単にできます。
濡れた蛇管の移動!

折りたたみ式中扉

- 洗浄工程終了後、洗浄槽から乾燥槽へ、洗浄物を移動するときは中扉を利用すれば、床を濡らすことなく移動ができます。
- 折りたたみ式中扉は、閉めた後にロックする構造になっており、洗浄水や乾燥エアがもれることはありません。

工程

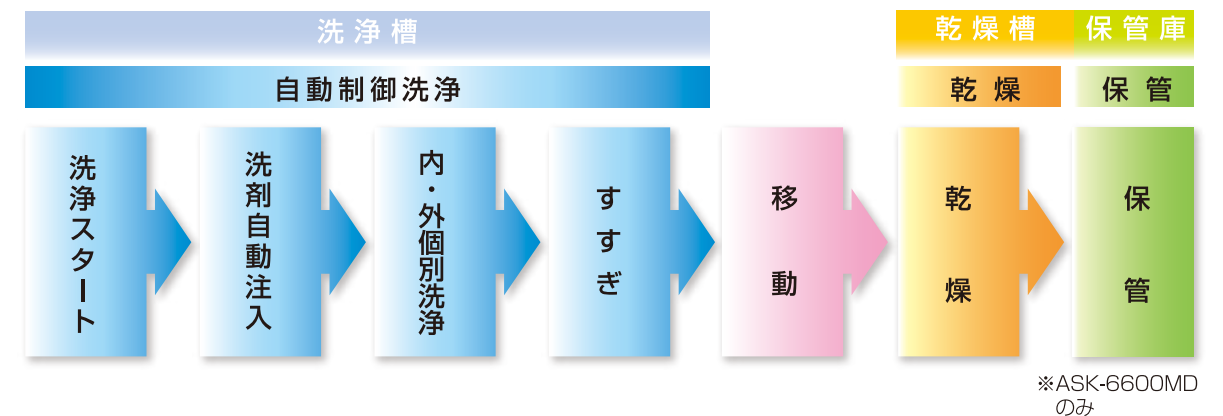

ASK-6600MDの優れた
保管システム

保管庫

保管庫はエアが循環し庫内壁面の紫外線ランプで照射します。

