

【庫内行程ランプ】 遠くから色を識別する事ができます。



仕様／寸法

製品名	軟性内視鏡除湿乾燥保管庫	軟性内視鏡除湿乾燥保管庫
型式	DEPO-04	DEPO-08
本体外寸法	1200W×700D×1950H (mm) (最大寸法)	2000W×700D×1950H (mm) (最大寸法)
開口部	870W×1765H (mm)	左扉 820W×1765H (mm) 右扉 820W×1765H (mm)
本体質量	210kg	330kg
材質	ステンレス SUS304 ヘアライン仕上げ	ステンレス SUS304 ヘアライン仕上げ
運転制御	自動専用型マイクロコンピュータ	自動専用型マイクロコンピュータ
定格電源	単相 100V 50/60Hz	単相 100V 50/60Hz
電源容量/消費電力	20A/1kw	20A / 1.5kw
発熱量/放熱量	877(kcal)/939(kcal)	1290(kcal)/1693(kcal)
使用環境	周囲温度 10～40℃ 相対湿度 30～85%	周囲温度 10℃～40℃ 相対湿度 30～85%

※カタログ仕様は予告なく変更することがあります。

関連商品

軟性内視鏡洗浄用 SYSTEM SINK

お客様のご要望に応じて
オーダーメイドの
内視鏡システムシンク
を製作しております。



内視鏡保持ホルダー



バスケットを重ねれば
場所もとらず
ラクラク収納。
WD洗浄可能!



製造元 **株式会社 アスカメディカル**

医療機器製造業許可証 27BZ200023 第2種医療機器製造販売業許可証 27B2X00210

■ 本社・工場 〒536-0008 大阪市城東区関目2丁目12番10号

TEL (06)6939-3011 (代) FAX (06)6939-3225

E-mail : askhm@asukamedical.co.jp


■ 東京支店 〒111-0055 東京都台東区三筋1-12-2 金子ビル1階

TEL (03)5820-5662 (代) FAX (03)5820-5663

■ 福岡営業所 〒812-0004 福岡市博多区榎田1丁目8-28 ツインスクエア3号

TEL (092)292-7971 FAX (092)292-7972

お問い合わせ先

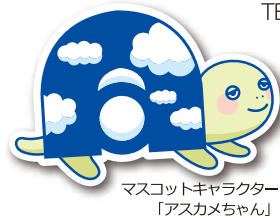

直接質問したい方はこちらからどうぞ。

アスカメディカル お問い合わせ

検索

2020.07.H.1000

軟性内視鏡を クリーンに安全に 乾燥・保管していますか？

消化器内視鏡ガイドラインを参照して
できた新アイテムです！
洗浄終了時のレベルを維持します。
これが開発コンセプトです。

ハンガーにかけて
いると中から水が
出るんだ…。
本当に乾いて
いるか不安…



DEPO-04



DEPO-08

低温除湿乾燥で安全に安心乾燥！

軟性内視鏡除湿乾燥保管庫

ASUKAMEDICAL CO.,LTD.

水分残り... ハイリスク汚染は大丈夫?

乾いていると思っていても...



●洗浄ブラシで



●鉗子口に洗浄ブラシを挿入



水が残ってた!

内視鏡チャンネル内に、水分が残っていると保管中に細菌が増殖する可能性がある為、内腔もきちんと乾燥します。

設置しやすい装着部



スタッフさんが軟性内視鏡をストレスなく、装着できるよう、装着部を斜め45度に設定しております。

アダプター



吸引ボタン・通気・送水/挿入口アダプター



吸引ボタン・通気・送水アダプター装着



鉗子挿入口アダプター装着



器械本体へアダプターを装着し、完了

タッチパネル



■ 操作部

各行程を表示します。タッチパネル式ですので、簡単に行程内容と操作が可能です。



■ 管理記録

No.管理が可能。出し入れ時に番号を押すと、管理記録がモニターで確認できます。※出力データはオプションになります。

除湿と風量で 中 も 外 も

乾燥 → 保管

HEPAフィルター



DEPO-08



DEPO-04

個別の小物ケース



送気・送水ボタン、吸引ボタン、鉗子栓などを個別にケースに入れて頂けます。小物ケースは取り外し可能です。

挿入部・接続部保持パッド



垂れ下がった挿入部・接続部を安全に保持します。通気性も良く、高温洗濯が可能です。

【社内乾燥データ】 30分間乾燥すると、内視鏡チャンネル内に残水は確認できません。



鉗子挿入口から水10cc注入



アダプター接続後、30分運転



水分が付着すると変色する乾燥インジケータのサンプルを使用した



インジケータで洗浄ブラシの先端・シャフトを拭き取る



変色は見られず、乾燥が完了している事を確認

これなら
安心だ!!
大丈夫!!

