

特許出願中

全ての汚れはシンクから
浸漬洗浄のプロフェッショナル

詳しくは動画を
チェック!

WEB展示会で説明中




昇 降 式

SYSTEM SINK

浸漬
洗浄

恒温槽付シンク

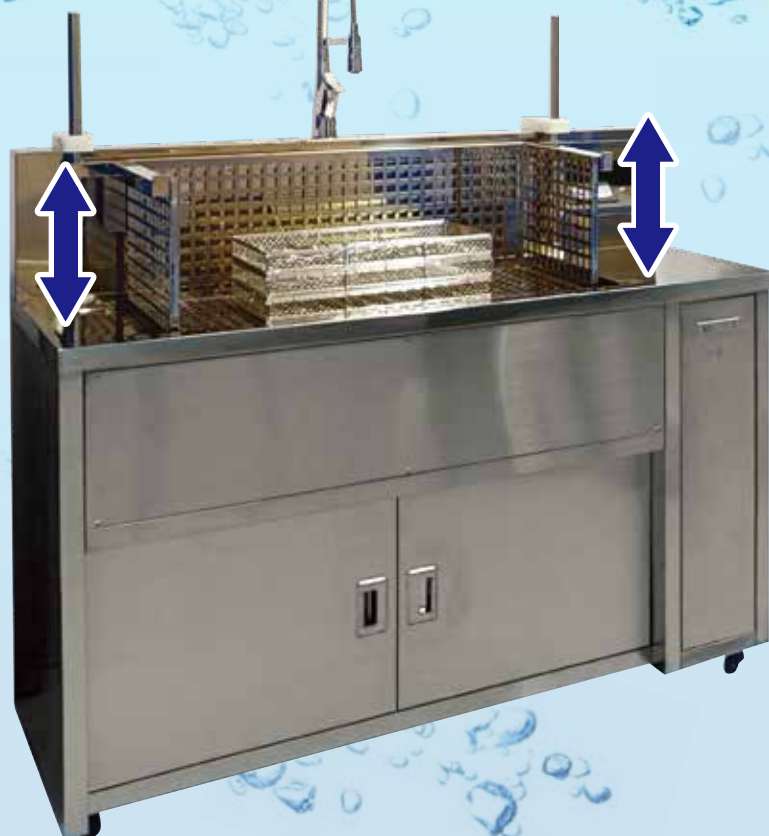


浸漬後、バスケットが自動で上がる
自動昇降式システム

液中で上下に揺らす
浸漬^{ようどう}揺動システム

槽内の温度を一定に保つ
温度管理システム

槽内の洗剤を均等に保つ
循環機能システム

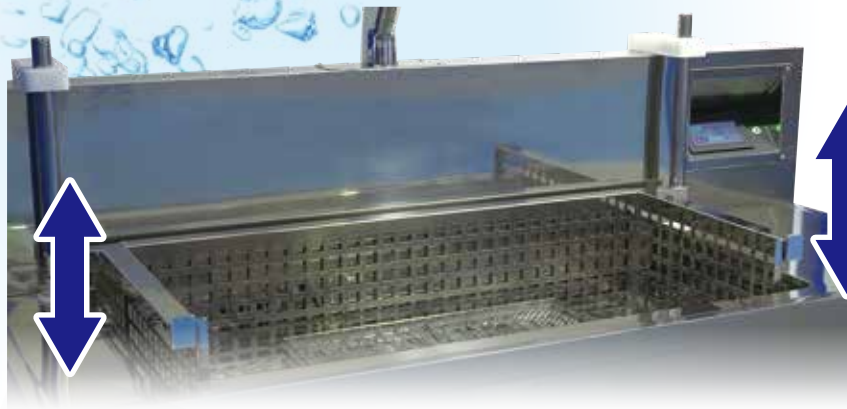


昇降式恒温槽付シンクで、 手間を省いて時間を有効に！

本製品は予備洗浄用であり、本洗浄用ではありません。

ポイント 1

浸漬洗浄が終了！ 自動的に昇降します。

液中の器材を上げ、水切りした
状態で取り出せる！

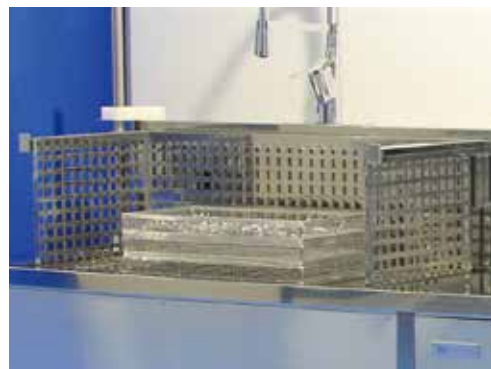

ポイント 2

槽内の温度を 均一に保つ

槽内は設定した温度に制御され、
一定に水温を保持します。



タッチパネルで時間を任意設定！
ボタン1つでカンタン！

ポイント 3

洗剤の濃度も 最適！

槽内循環により、洗剤の
濃度が均一になります。




※循環は正転、逆転で環流させます。

ポイント 4

浸漬中は、バスケットを 上下に5cmほど優しく揺らし 続けます。(液中の水も上下に揺れます。)

※揺らす高さ、時間は任意設定可能！

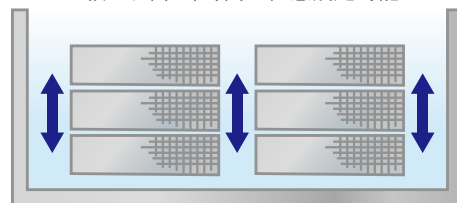

槽内循環に加え、上下の揺動システムで
汚れを引き離し、気泡溜まりを改善できます！

ポイント 5

槽内や配管内は清潔ですか？

作業終了後(薬液交換時)、ボタンひとつで槽内・
配管内の自動洗浄がスタート！槽内・配管内を
フラッシング！



●仕様・寸法

外 寸 法	W1,500×D600×H1,150mm (内バックガードH300mm) 又は、W1,500×D600×H850mm (+バックガードH300mm)
槽 内 寸 法	W1,000×D450×H300 mm
昇降式専用バスケット	W890 ×D370×H300mm (有効W870×D350×H155mm)
給 水	バルブ止め 20A FL100mm
給 湯	バルブ止め 20A FL100mm
排 水	50A (VP) FL100mm立ち上がり
電 源	AC100V 15A 専用供給

※上記の必要な設備が準備できる場所であれば設置可能です。
※オーダーメイドのご相談は営業担当に申し付けください。



マスコット
キャラクター
「アスカメちゃん」

「直接質問したい!」という方は、こちらから

アスカメディカル お問い合わせ

検 索

自社展示会も
Webにて開催中!



Follow me /



製造元

株式会社 アスカメディカル

医療機器製造許可証 27BZ200023
第2種医療機器製造販売業許可証 27B2X00210

本社・工場/〒536-0008 大阪市城東区関目2丁目12番10号 TEL (06) 6939-3011 FAX (06) 6939-3225
東京支店/〒111-0055 東京都台東区三筋1-12-2 金子ビル1階 TEL (03) 5820-5662 FAX (03) 5820-5663
福岡営業所/〒812-0004 福岡市博多区榎田1丁目8-28 ツインスクエア3号 TEL (092) 292-7971 FAX (092) 292-7972

askhm@asukamedical.co.jp https://asukamedical.co.jp

お問い合わせ先