

仕様・寸法	
製品名	CYCLE BEST サイクルベスト
型式	ASK-850mi
本体寸法	W850×D670×H1,855mm
庫内寸法	W450×D340×H1,600mm
本体質量	180kg
標準付属品	チューブ用カートリッジ×3 蛇管用カートリッジ×3
消費電力	811W
使用環境	周囲温度：20～40℃ 相対湿度：30～85%

必要設備	
電源	単相100V 15A アース付コンセント(単独回路)
給水設備	15A SGPまたはVP FL+100mm バルブ止め 0.2～0.3MPa
給湯設備	15A SGPまたはHT FL+100mm バルブ止め 0.2～0.3MPa
排水設備	50A SGPまたはVP FL+50mm キャップ止め(背圧無き事)
(RO水設備)	15A SUS FL+100mm バルブ止め 0.2～0.3MPa

洗剤

●専用洗剤
アスカピュア
(AC-6000)

NET.3.5L
1ケース 4本入り



チューブ・蛇管洗浄乾燥器

CYCLE BEST
サイクルベスト



本体付属品

●カートリッジ
簡単に脱着できる蛇管用とチューブ用の2タイプで用途に応じてご使用できます。



※カタログ仕様は予告なく変更することがあります。

チューブ・蛇管洗浄乾燥器

CYCLE BEST
サイクルベスト
ASK-850mi

全自動による
洗浄・乾燥システム



製造元 **株式会社 アスカメディカル**

- 本社・工場 〒536-0008 大阪市城東区関目2-12-10
TEL (06)6939-3011 FAX(06)6939-3225
- 東京支店 〒111-0055 東京都台東区三筋1-12-2 金子ビル1階
TEL (03)5820-5662 FAX(03)5820-5663
- 福岡営業所 〒812-0004 福岡市博多区榎田1-8-28 ツインスクエア3号
TEL (092)292-7971 FAX(092) 292-7972



直接質問したい方はこちらからどうぞ。

アスカメディカル 問い合わせ

お問い合わせ先

ASUKAMEDICAL CO.,LTD.

洗浄と乾燥の 新機構

- 専用カートリッジに装着し、セットするワンタッチ脱着方式
- クリーンエアで、温風乾燥陽圧エアをリークする置換乾燥

●蛇管洗浄

蛇管は、専用のカートリッジに10本架、計30本の洗浄と乾燥ができます。カートリッジに継いだ蛇管の内筒をノズル噴射で洗浄します。蛇管外筒は庫内4隅に設置した上段、中段、下段 計16ヶの噴射ノズルで洗浄を行い、外筒の全てを洗浄します。

●チューブ洗浄

チューブ類は、専用のカートリッジに15本架 計45本の洗浄と乾燥ができます。カートリッジに継いだ各チューブ類の内筒をノズル噴射で洗浄します。各チューブ類外筒は、庫内4隅に設置した上段、中段、下段 計16ヶのノズルで洗浄を行い、外筒の全てを洗浄します。

●ロングチューブ洗浄

独自のクロスパイプを、庫内背面に6本設置。ワンタッチで水平に起こし、チューブ・蛇管をクロスにかけて、縦ウェーブ状に曲折して、内筒、外筒を洗浄します。

●温風置換乾燥

ろ過したエアを60℃に加温し、カートリッジを通し、強制的に内筒を吹き抜ける内筒乾燥と庫内背面上部に設置した攪拌用ファンが乱流し、外筒を乾燥する相乗効果が短時間での乾燥を実現。合わせて庫内陽圧エアを、排気口より常圧にリークするエア置換方式が効果を上げます。



ASK-850mi

●サイクルベスト

●制御パネル
洗浄時間 } をセット
すすぎ時間 }
乾燥時間 }
洗浄スイッチ ON で、完了まで全自動制御で行います。


●サイクル専用洗剤
洗浄スイッチ ON(スタート)で、洗剤が自動注入します。洗剤ボトルの残液が外から確認できます。

●防塵フィルター・HEPAフィルター


●ロングチューブ装着式



●上段ノズル配置図

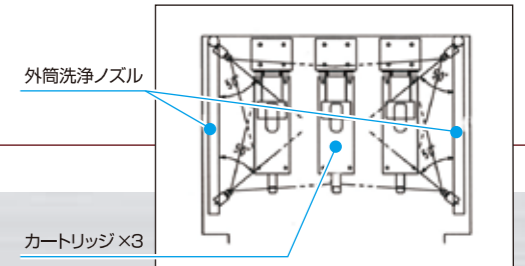

●庫内ノズル配置図(クロスパイプ)

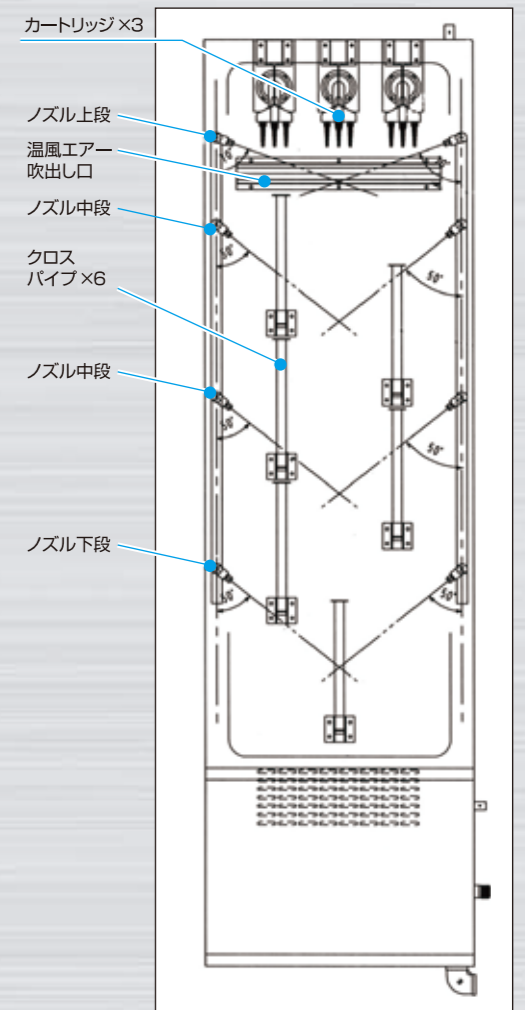

●サイクルベスト フローチャート

