

仕様・寸法	
製品名	CYCLE JET サイクルジェット
型式	ASK-6000MD
本体寸法	W1,200×D750×H1,850mm
庫内寸法	洗浄：W540×D325×H1,425mm 乾燥：W540×D325×H1,170mm
本体質量	310kg
標準付属品	チューブ用カートリッジ×3 蛇管用カートリッジ×3
消費電力	1,240W
使用環境	周囲温度：20～40℃ 相対湿度：30～85%

必要設備	
電源	三相200V 20A ブレーカー止め 接地端子付
給水設備	15A SGPまたはVP FL+100mm バルブ止め 0.2～0.3MPa
給湯設備	15A SGPまたはHT FL+100mm バルブ止め 0.2～0.3MPa
排水設備	50A SGPまたはVP FL+50mm キャップ止め(背圧無き事)
(RO水設備)	15A SUS FL+100mm バルブ止め 0.2～0.3MPa

**洗剤**

●専用洗剤  
アスカピュア  
(AC-6000)

NET.3.5L  
1ケース 4本入り



製造元 **株式会社 アスカメディカル**  
医療機器製造業許可証 27BZ200023 第2種医療機器製造販売業許可証 27B2X00210

■本社・工場 〒536-0008 大阪市城東区関目2-12-10  
 TEL (06)6939-3011 FAX(06)6939-3225

■東京支店 〒111-0055 東京都台東区三筋1-12-2 金子ビル1階  
 TEL (03)5820-5662 FAX(03)5820-5663

■福岡営業所 〒812-0004 福岡市博多区榎田1-8-28 ツインスクエア3号  
 TEL (092)292-7971 FAX(092) 292-7972



直接質問したい方はこちらからどうぞ。  
 アスカメディカル 問い合わせ

お問い合わせ先

チューブ・蛇管洗浄乾燥器



ASK-6000MD



本体付属品

●カートリッジ  
簡単に脱着できる蛇管用とチューブ用の2タイプで用途に応じてご使用できます。



※カタログ仕様は予告なく変更することがあります。

チューブ・蛇管洗浄乾燥器




ASK-6000MD

自動制御による

洗浄 乾燥

こんなものが  
洗浄・乾燥できます

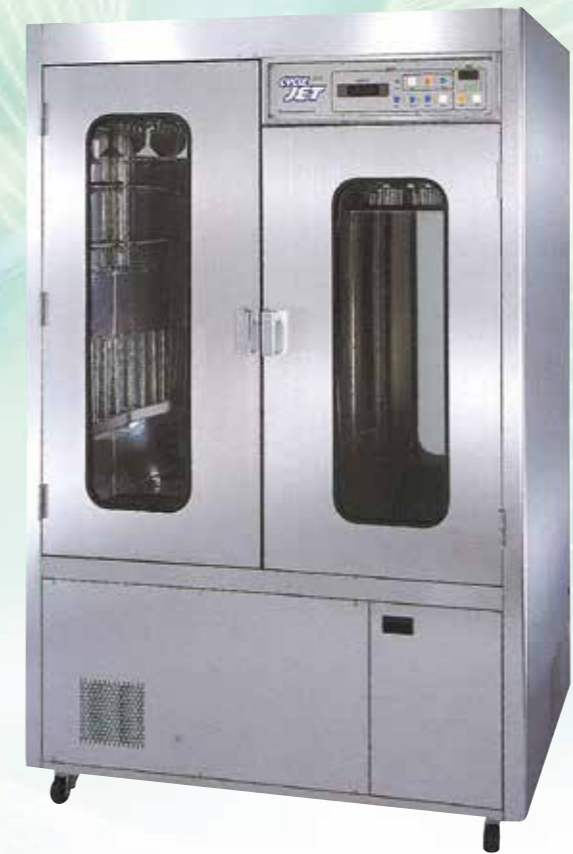


ASK-6000MD



ASK-6000MD [2槽タイプ]

# 1日にたくさんの量をこなすなら 頼りになる『サイクルジェット』

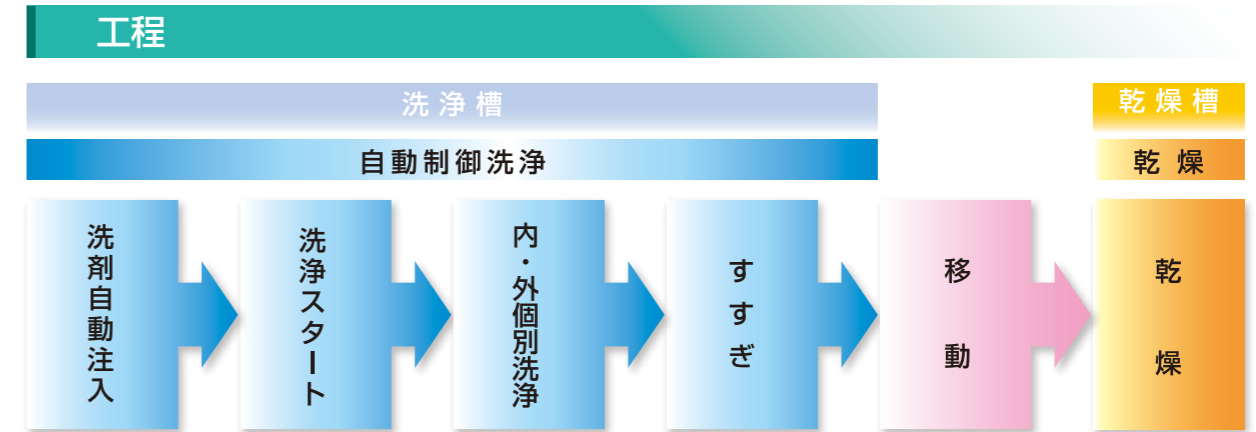

## 洗浄槽

対象物を専用カートリッジにつらし、ノズルから勢よく噴き出す洗浄水により、従来まで洗いきれなかった内筒を洗浄できます。外筒は側面18ヶ所の広角ノズルから洗浄します。

## 乾燥槽

バッグ、チューブ、蛇管等の内筒・外筒を専用カートリッジから噴き出す風により乾燥します。

### ●チューブ専用カートリッジ (乾燥槽も同様です)

作業台等でチューブの装着が可能なカートリッジ式。

※1カートリッジに15本装着可能。  
チューブのみ器械へ最大45本設置可能。



### ●麻酔バッグ用フック

麻酔バッグはフックに引っ掛け、ノズルに差し込めば、5本洗浄可能です。



### ●蛇管専用カートリッジ (乾燥槽も同様です)

作業台等で蛇管装着が可能なカートリッジ式。(小児用サイズの特注可)

※1カートリッジに10本装着可能。  
蛇管のみ器械へ最大30本設置可能。



1人で簡単にできます。  
濡れた蛇管の移動!

### 折りたたみ式中扉

- 洗浄工程終了後、洗浄槽から乾燥槽へ、洗浄物を移動するときは中扉を利用すれば、床を濡らす事なく移動ができます。
- 折りたたみ式中扉は、閉めた後にロックする構造になっており、洗浄水や乾燥エアがもれることはありません。

