

仕様・寸法	
製品名	CYCLE QUEST サイクルクエスト
型式	ASK-6500ST
本体寸法	W1,200×D750×H1,860mm
庫内寸法	W450×D340×H1,600mm
本体質量	330kg
標準付属品	チューブ用カートリッジ×3 蛇管用カートリッジ×3
消費電力	1,500W
使用環境	周囲温度：20～40℃ 相対湿度：30～85%

必要設備	
電源	三相200V 30A ブレーカー止め 接地端子付
給水設備	15A SGPまたはVP FL+100mm バルブ止め 0.2～0.3MPa
給湯設備	15A SGPまたはVP FL+100mm バルブ止め 0.2～0.3MPa
排水設備	50A SGP FL+50mm キャップ止め(背圧無き事)
(RO水設備)	15A SUS FL+100mm バルブ止め 0.2～0.3MPa

洗剤

●専用洗剤
アスカピュア (AC-6000)

NET.3.5L
1ケース 4本入り




チューブ・蛇管洗浄乾燥器



ASK-6500ST

入れるだけで
消毒まで
お任せください!



本体付属品

●カートリッジ
簡単に脱着できる蛇管用とチューブ用の2タイプで用途に応じてご使用できます。



*カタログ仕様は予告なく変更することがあります。

CYCLE QUEST

チューブ・蛇管洗浄乾燥器

[サイクルクエスト]
ASK-6500ST

こんなものが
洗浄できます



全自動制御による
洗浄

**熱水
処理**

乾燥

製造元 **株式会社 アスカメディカル**

医療機器製造業許可証 27BZ200023 第2種医療機器製造販売業許可証 27B2X00210

- 本社・工場 〒536-0008 大阪市城東区関目2-12-10
TEL (06)6939-3011 FAX(06)6939-3225
- 東京支店 〒111-0055 東京都台東区三筋1-12-2 金子ビル1階
TEL (03)5820-5662 FAX(03)5820-5663
- 福岡営業所 〒812-0004 福岡市博多区榎田1-8-28 ツインスクエア3号
TEL (092)292-7971 FAX(092) 292-7972

お問い合わせ先



直接質問したい方はこちらからどうぞ。

アスカメディカル お問い合わせ

ASUKAMEDICAL CO.,LTD.

全自動で 洗浄 熱水処理 乾燥 手間いらず!

医療現場での院内感染防止対策が急務になる中、従来のノズル噴射による洗浄に加え、感染防止システムの構築を目指し開発されたのがサイクルクエスト ASK-6500STです。

これまでの手間やコストがかかる消毒剤使用の消毒ではなく、熱水消毒により、経済性や残留問題が解消できます。熱水処理での設定温度を70℃～93℃と任意に設定でき、ガイドラインと施設に沿った設定管理が可能です。感染防止と安全性を追求し、経済面からもサポートするサイクルクエスト ASK-6500STを医療施設の新構築に、ぜひお役立てください。

特長 1 つるし洗浄

対象物を専用カートリッジにつるし、ノズルから勢いよく噴き出す洗浄水により、従来まで洗いきれなかった内筒を洗浄できます。外筒は側面18ヵ所の広角ノズルから洗浄します。

特長 2 熱水処理温度の任意設定が可能(70～93℃)

CDC(米国疾病予防管理センター)の感染対策ガイドラインに基づき、温度が設定可能です。ガイドラインが変更された場合でも対応できます。

特長 3 内筒まで乾燥可能

専用カートリッジのノズルから勢いよく噴き出す風により乾燥できます。洗浄器・乾燥器、個別ではなく1台2役です。

メリット

別途、乾燥器の購入が不要
乾燥器に移し変えるスタッフさんの手間も解消!



- **蛇管専用カートリッジ**
作業台等で蛇管装着が可能なカートリッジ式。(小児用サイズの特注可)
※1カートリッジに10本装着可能。
蛇管のみ器械へ最大30本設置可能。



カートリッジ式なので作業台等で対象物を準備ができ、洗浄器にもラクラク設置。

- **麻酔バッグもフックに引っ掛けノズルに差し込めば5本洗浄可能です。**

- **チューブ専用カートリッジ**
作業台等でチューブの装着が可能なカートリッジ式。
※1カートリッジに15本装着可能。
チューブのみ器械へ最大45本設置可能。



- **液晶タッチパネル**
残り時間表示
現在の工程を確認できます。
エラー発生時はディスプレイにエラー内容を表示し報知します。
(安全監視ソフト内蔵)



工程中画面

- **プリンター**
感染管理対策のため、日付・時間・工程内容などを記載し、熱水温度は1分単位で出力します。



- **クロスパイプ**
ワンタッチで水平にできるパイプにチューブ・蛇管などをかけ、縦ウェーブ状にすることで長尺のものを洗浄可能に。
※庫内6本設置



■ 洗浄工程

